



# AIR LOMBAIRE

Ceinture Lombaire à Air

Modèles INTEGRALE - L4 L5 S1 - L5 S1



## NOTICE

**Lire attentivement la notice afin de bénéficier d'une mise en place correcte et d'un fonctionnement optimal du dispositif.**

Conformément au règlement (UE) 2017/745, les articles désignés dans cette notice sont un dispositif médical de classe I. Ce dispositif a fait l'objet d'une analyse de risques (EN ISO 14971:2019) afin de réduire tout risque. Selon les résultats de celle-ci, des essais ont été réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

En cas de doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, demandez conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

### DESCRIPTION :

La ceinture lombaire gonflable est prête à l'emploi, la poire de gonflage fournie avec le dispositif permet de la gonfler une fois installée sur le dos du patient. Elle dispose d'une bande permettant de l'adapter sur le corps du patient et de deux bandes obliques.

### INDICATIONS :

Pour les patients ayant des douleurs lombaires d'origines compressives comme les pathologies suivantes : sciatique, hernie discale, cruralgie, tassement, spondylolisthésis, lumbago, discopathie, lombalgie..

### CONTRE INDICATIONS :

Il n'y a pas de contre-indications à l'utilisation de ce dispositif sauf en cas d'allergie connue à un des composants.

### BENEFICE CLINIQUE :

Le dispositif permet une décompression ciblée de la colonne vertébrale permettant de soulager les douleurs et favorise l'hydratation des disques intervertébraux.

### REFERENCES ET TAILLES :

Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation de ces produits, il est indispensable :

- De choisir la taille adéquate en fonction du tour de taille et de hanche.
- De choisir le modèle adéquat en fonction de la pathologie
- D'ajuster au mieux le produit sur le patient.

Modèle	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Tour de taille	60 à 86 cm	84 à 102 cm	100 à 122 cm	120 à 142 cm	140 à 162 cm	160 à 182 cm

### ENTRETIEN :

Laver à la main avec un savon doux, puis rincer abondamment et laisser sécher à l'air libre.

### UTILISATION DE LA POIRE :

Embout noir pour dégonfler




Embout transparent pour gonfler



# AIR LOMBAIRE

## Ceinture Lominaire à Air

Modèles INTEGRALE - L4 L5 S1 - L5 S1

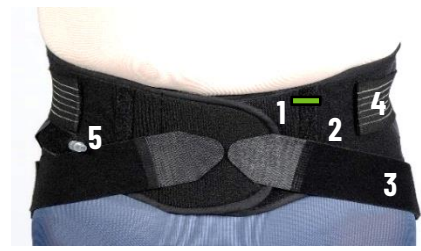

### MISE EN PLACE :

Avant la première utilisation, nous vous invitons à visualiser la vidéo de mise en place disponible sur la page produit du site [www.maldedos.solutions](http://www.maldedos.solutions), sur YouTube (en tapant MAL DE DOS SOLUTIONS dans la barre de recherche) ou en flashant le QR-CODE.

**Etape 1 :** L'étiquette tissée AIR LOMBAIRE doit être située à l'extérieur, sur le devant et en haut de la ceinture.

Avant d'être mise en place, la ceinture doit être dégonflée.

**Etape 2 :** Positionner la ceinture en bas du dos, sur les fesses. Rentrer le ventre, puis refermer la ceinture à l'aide des larges bandes agrippantes.

**Etape 3 :** Avant de gonfler, serrer fermement les sangles obliques non élastiques, passant sur les hanches. Il faut les agripper sur la partie ventrale.

**Etape 4 :** Pour les modèles Intégrale, L4L5S1 et L5S1, serrer les sangles supérieures élastiques.

**Etape 5 :** Gonfler alors la ceinture grâce à la poire de gonflage amovible :

- D'une main, tenir l'embout de gonflage transparent.

- De l'autre main, enfoncer délicatement la partie transparente de la poire de gonflage, en faisant des rotations successives d'1/4 de tour. Pomper jusqu'à l'obtention du maintien souhaité. Déconnecter alors la poire.

En période de crise douloureuse, nous vous conseillons de gonfler intensément la ceinture, puis de la dégonfler progressivement lorsque la douleur a disparu.

**Etape 6 :** Pour des raisons pratiques, il est recommandé de dégonfler la ceinture avant de l'ôter, afin de bénéficier de la pression du corps pour faciliter le dégonflage. Ainsi, connecter l'extrémité noire de la poire dans l'embout de gonflage transparent de la ceinture, en faisant des rotations successives d'1/4 de tour : l'air quitte spontanément la ceinture.

### AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS :

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient.

Ce dispositif ne doit pas être mis en contact de la peau lésée. La ceinture se porte sur un maillot de corps.

En cas de non-amélioration ou d'aggravation de la pathologie, arrêter l'utilisation du dispositif et consulter un médecin.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

Avant chaque utilisation contrôler l'état, en cas de défaut, veuillez contacter l'établissement de distribution.

Tout accident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant : Orthomedica et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

### IMPORTANT :

Il est possible, dans le cadre d'une utilisation prolongée ou de variation de pression (en avion notamment), que la ceinture semble se dégonfler légèrement. Il convient alors de regonfler légèrement la structure gonflable conformément aux instructions ci-dessus.

Il est possible, en cas d'exposition à des variations de température importantes, que la valve de gonflage se grippe momentanément. Il convient alors d'utiliser un dégrippant classique (type W40) pour restaurer la fonction de la valve puis de regonfler légèrement la structure gonflable conformément aux instructions ci-dessus.



ORTHOMEDICA S.A.S  
7 rue de Cluj, 21000 - DIJON - FRANCE  
sav@maldedos.solutions



### Informations

08 05 38 48 58

N° Gratuit - 7 j/7 - 24h/24



LE TRI  
+ FACILE

ETUI VIDE +  
NOTICE

